

Monitor Przyłóżkowy

Seria SVM-7500



Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**

Do zaawansowanego monitorowania


Intuicyjny ekran dotykowy

Ekran dotykowy zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Wystarczy dotknąć obszaru danych pacjenta lub parametru aby zobaczyć więcej informacji lub zmienić ustawienia. Prosta obsługa pomaga skupić się na pacjencie.


120 godzin zsynchronizowanych danych przeglądu

Zapisywanych jest do 120 godzin danych przeglądu.


Ekran przeglądu są zsynchronizowane w celu łatwej analizy zdarzeń z różnych perspektyw. Przejrzyste okna przeglądu pomagają w podejmowaniu decyzji klinicznych.

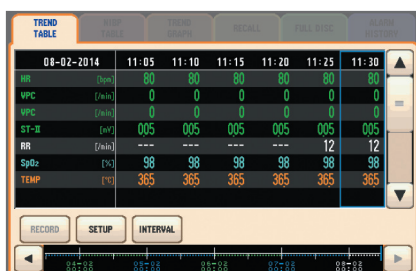

Trend tabelaryczny

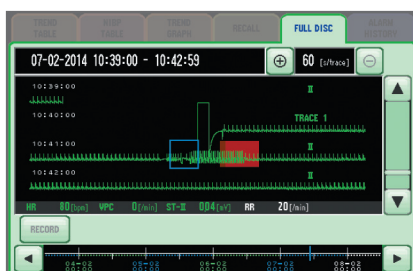


Full disclosure

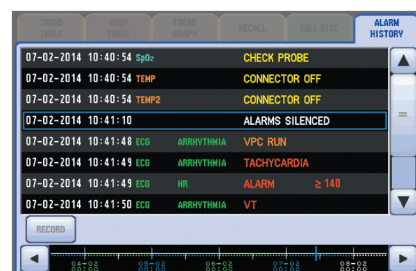


Historia alarmów

Interbed daje szybki dostęp do dowolnego pacjenta w sieci

Z dowolnego monitora można sprawdzić informacje o parametrach życiowych i stany alarmowe każdego innego monitora w sieci. Z pomocą funkcji Interbed możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie stanu każdego pacjenta. Prowadzi to do lepszej opieki nad wszystkimi pacjentami.

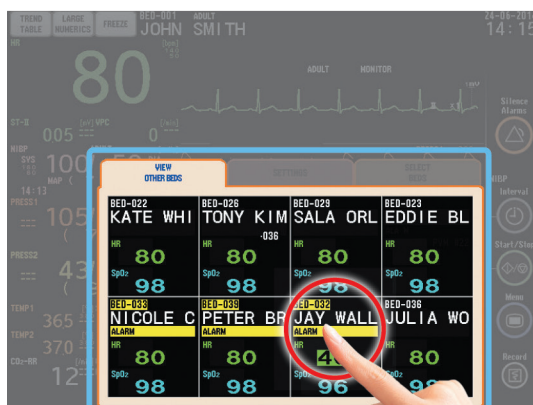

Ekran wielu łóżek

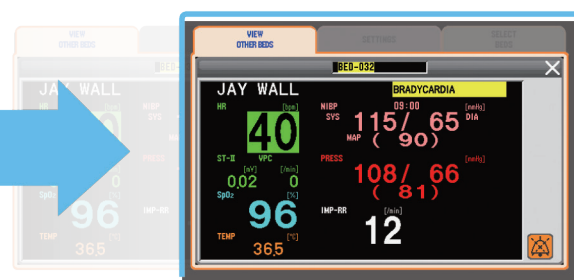

Okno pojedynczego łóżka

SVM-7503
10.4" LCD



SVM-7523
12.1" LCD




Obsługa przyjazna użytkownikowi

Przewodnik na ekranie z pomocnymi ilustracjami ułatwia obsługę monitora i wykonywanie podstawowych czynności nawet początkującym użytkownikom.

Przewodnik zawiera również wyjaśnienia skrótów parametrów, arytmii oraz ikon, które można znaleźć we wszystkich monitorach firmy Nihon Kohden.

Wygodna obsługa pomaga skupić się na lepszej opiece nad pacjentem.

Przewodnik ekranowy

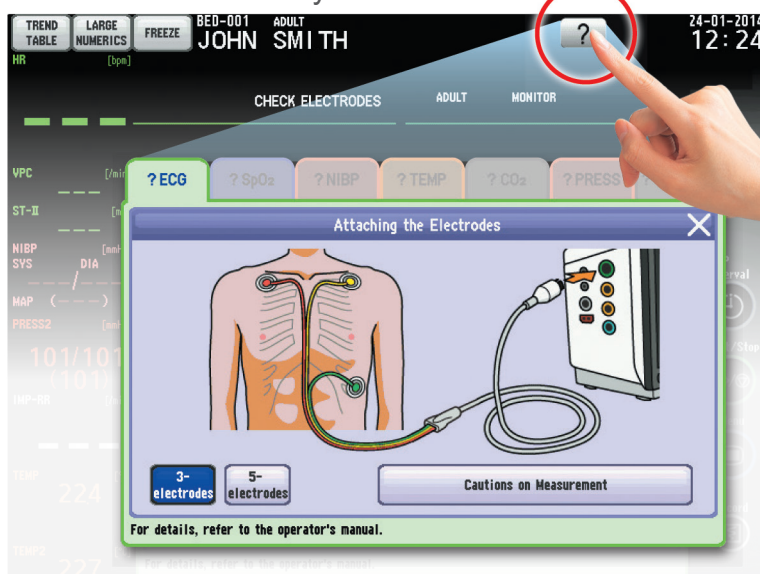

Lista skrótów

PARAMETERS	ITEMS	EXPLANATION
PARAMETERS	CO ₂ -RR	Respiration rate (CO ₂)
ARRHYTHM	DIA	Diastolic pressure
ICONS	HR	Heart rate
	IMP-RR	Respiration rate (impedance)
	MAP	Mean arterial pressure
	MEAN	Mean pressure
	NIBP	Non-invasive blood pressure

Parametry

PARAMETERS	ITEMS	EXPLANATION
PARAMETERS	ASYSTOLE	Asystole
ARRHYTHM	BIGEMINY	Ventricular bigeminy
ICONS	BRADYCARDIA	Bradycardia
	COUPLET	VPC couplet
	EARLY VPC	Early VPC, including R on T type
	FREQ VPC	Frequent VPC (reaching or exceeding the preset limit per minute)
	TACHYCARDIA	Tachycardia

Arytmie

PARAMETERS	ITEMS	EXPLANATION
PARAMETERS	☒	All alarm off
ARRHYTHM	☒	Alarm suspended
ICONS	☒	Alarm silence
	☒	Alarm silence with remaining time
	☒	Alarm reset
	☒	Battery status
	☒	Checking data

Ikony

Niezawodność, jakość oraz wydajność

Aby zapewnić wysoką jakość i wydajność monitory przyłóżkowe SVM-7500 zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane z zachowaniem tych samych surowych standardów, co inne produkty firmy Nihon Kohden.

Najwyższa jakość firmy Nihon Kohden przekłada się na doskonały całkowity koszt posiadania i najlepszy zwrot inwestycji przez cały okres użytkowania produktu.

Wyświetlacz	
SVM-7501, SVM-7503	10.4-calowy, kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD
SVM-7521, SVM-7523	12.1-calowy, kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD
Rozdzielczość	800 x 600 pkt.
Liczba przebiegów	
SVM-7501, SVM-7503	4
SVM-7521, SVM-7523	6
Parametry	
SVM-7501, SVM-7503	EKG, Oddech, NIBP, SpO ₂ , Temperatura
SVM-7521, SVM-7523	EKG, Oddech, NIBP, SpO ₂ , Temperatura, IBP, CO ₂
Zapisane krzywe	120 godzin jednej krzywej EKG (lub SpO ₂ gdy nie jest mierzone EKG)
Wykres trendu	120 godzin
Lista wartości numerycznych	120 godzin
Przegląd arytmii	120 godzin
Historia alarmów	120 godzin
Czas pracy baterii	6 godzin
Rejestrator	3 przebiegi
Interfejs sieciowy	Standardowy
Interbed	8 łóżek
Wymiary	330 SZ x 274 W x 156 G mm
Waga	4 kg

Niniejsza ulotka może zostać w każdej chwili zmodyfikowana lub zastąpiona przez firmę Nihon Kohden bez uprzedzenia

Diagnos



Diagnos Sp z o.o.

ul. Łączyny 4

02-820 Warszawa

tel: +48 22 331 05 01...04

fax: +48 22 331 05 00

 **NIHON KOHDEN**

NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4 Nishiiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan

Phone +81 (3) 5996-8036 Fax +81 (3) 5996-8100

www.nihonkohden.com